

COVID-19 Antigen Schnelltest (nasal)

Schritt 1: Vorbereitung

- Material bereitlegen
- bei Bedarf schnäuzen
- Hände desinfizieren



Schritt 2: Vorbereitung

- Testkassette öffnen
- Röhrchen mit Pufferlösung und Spenderkappe bereitlegen
- Tupfer aus Packung nehmen
- Papiertuch bereitlegen


Schritt 3: Nasenabstrich

- Kopf nach hinten neigen
- Tupfer ca. 2cm einführen
- Tupfer 4x drehen (ca. 15 sec.) an der Naseninnenseite
- Im anderen Nasenloch gleich vorgehen




Schritt 4: Tupfer in Röhrchen

- Röhrchen in die andere Hand nehmen und Deckel nach oben schieben
- Tupfer in die Lösung stecken
- Röhrchen drücken
- Tupfer ca. 10mal drehen
- Tupfer unter Druck entfernen und auf Papiertuch ablegen

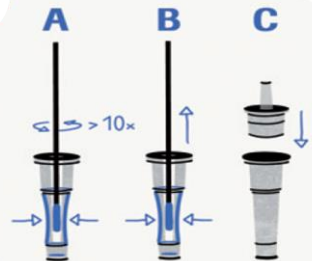

Schritt 5: Tropfen auf Teststreifen geben


- Spenderkappe auf Röhrchen setzen
- 4 Tropfen auf Teststreifen geben, 15 min. warten

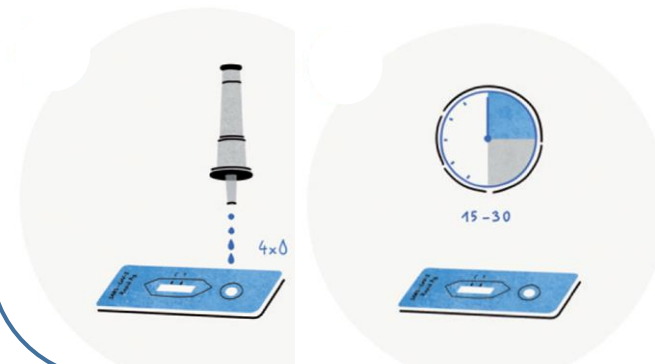

Schritt 6: Ergebnis ablesen

C=Kontrolllinie


T=Testlinie

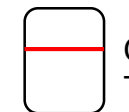

C

T


Test ist **negativ** = kein Hinweis auf Infektion mit SARS-CoV2

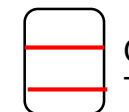

C

T

Test ist **positiv** = Infektion mit SARS-CoV2

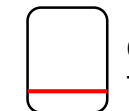

C

T

Test ist **ungültig** = **Wiederholung** sofort notwendig

Bitte anschließend Hände desinfizieren und alle Materialien in die vorbereiteten Mülleimer werfen!